

Défibrillateur Automatisé Externe **SAMARITAN PAD 300**



Un investissement pour la vie !

En France, on dénombre chaque année **40.000 décès** dus à un arrêt cardiaque subit, soit **110 décès par jour**. 80% de ces décès se déroulent dans les lieux publics, hôtels, restaurants, voies publiques, au travail et/ou sont liés à une activité sportive.

Chaque minute perdue fait diminuer de 10% les chances de rétablissement sans séquelles. Afin d'augmenter les chances de survie, la défibrillation doit être réalisée dans les 5 premières minutes suivant l'accident.



Ce défibrillateur automatisé externe (DAE), de configuration et fabrication européenne (Royaume-Uni) permettra de remplir les obligations de moyens du chef d'entreprise, en optimisant l'efficacité des soins d'urgence avant l'arrivée du SAMU/Pompier et ainsi de sauver la vie de vos clients et collaborateurs.

Une simplicité d'utilisation

Sa simplicité permet une utilisation libre à toute personne même non médecin, conformément au décret du 4 Mai 2007 sur les défibrillateurs automatisés externes grand public.

Sa fiabilité a été approuvée par les certifications IP56 (Indice de Protection contre les poussières et les projections de liquides), et dans le cadre de la directive 93/42/CEE.

Il est conforme à la version 2005 des recommandations AHA/ERC relatives à la réanimation cardio-pulmonaire et aux soins cardio-vasculaires d'urgence.

Qu'est-ce que l'indice de protection IP 56 ?

Note 5 sur 6 à la poussière: très important car l'appareil reste statique et accumule de la poussière indécrite pour les systèmes électriques, c'est pourquoi sa conception vous garantit une très bonne protection à la poussière pour un bon fonctionnement même après une longue période sans utilisation

Note 6 sur 6 à l'eau: vous pouvez l'entreposer et l'utiliser dans des endroits humides. Il bénéficie d'une très bonne protection contre les paquets d'eau. Parce que des incidents arrivent sur les terrains aux conditions climatiques pas toujours favorables.

Il parle dès que l'on presse le bouton On/Off

Son débit verbal s'adapte à la vitesse de réaction de son interlocuteur.

Facile et Simple d' usage



1: Presser le bouton



2: suivre les instructions



3: déclencher le choc

> Trois symboles lumineux facilement compréhensibles, ainsi que l'assistance vocale claire, expliquent chaque étape importante de la réanimation cardio-pulmonaire.

> Il analyse l'état du cœur du patient et, s'il a détecté un arrêt cardiaque, et **uniquement dans ce cas**, guide l'utilisateur pour déclencher la défibrillation.

Un métronome intégré vous donne la fréquence des compressions thoraciques.

Cet appareil peut être utilisé et manipulé sans risque par des personnes malentendantes grâce à l'instruction visuelle clairement indiquée sur le défibrillateur.

Le Pad-Pak

(pile au lithium et jeu d'électrode)

Intégrées directement à l'appareil, les électrodes de défibrillation sont reliées à la batterie de manière indissociable. Ceci garantit une disponibilité immédiate de l'appareil à tout moment, même après une longue période sans intervention. Une fois la pile insérée, aucune maintenance n'est nécessaire pendant une durée de 3,5 ans, (autotest hebdomadaire compris). La date de péremption du Pad-Pak est clairement indiquée au dos de la pile.



La pile et les électrodes doivent être changées après chaque utilisation. Chaque pack permet la délivrance de 30 chocs à puissance maximale et 60 minutes de monitoring. Le témoin de batterie faible signale au moins 10 décharges restantes.

Le Samaritan PAD utilise la technologie SCOPETM Bi-phasique: onde bi-phasique ascendante optimisée qui compense l'énergie, la pente et l'enveloppe de l'impédance du patient. Le niveau de puissance délivré est ascendant: 100 / 150 / 200 joules, ou 55 à 66 joules avec les électrodes enfant.


Détection automatique des électrodes enfant.

Le Samaritan PAD intègre un système d'analyse du patient qui évalue l'ECG afin de déterminer si la défibrillation est nécessaire.

La durée de l'analyse de l'ECG est de 7 secondes.

La durée de la montée en charge avant déclenchement est de 8 secondes.

Les données des autotests hebdomadaires et des interventions sont stockées dans la carte mémoire de l'appareil. Elles peuvent être récupérées très simplement au moyen d'un ordinateur via le logiciel Saver One et du câble data USB.

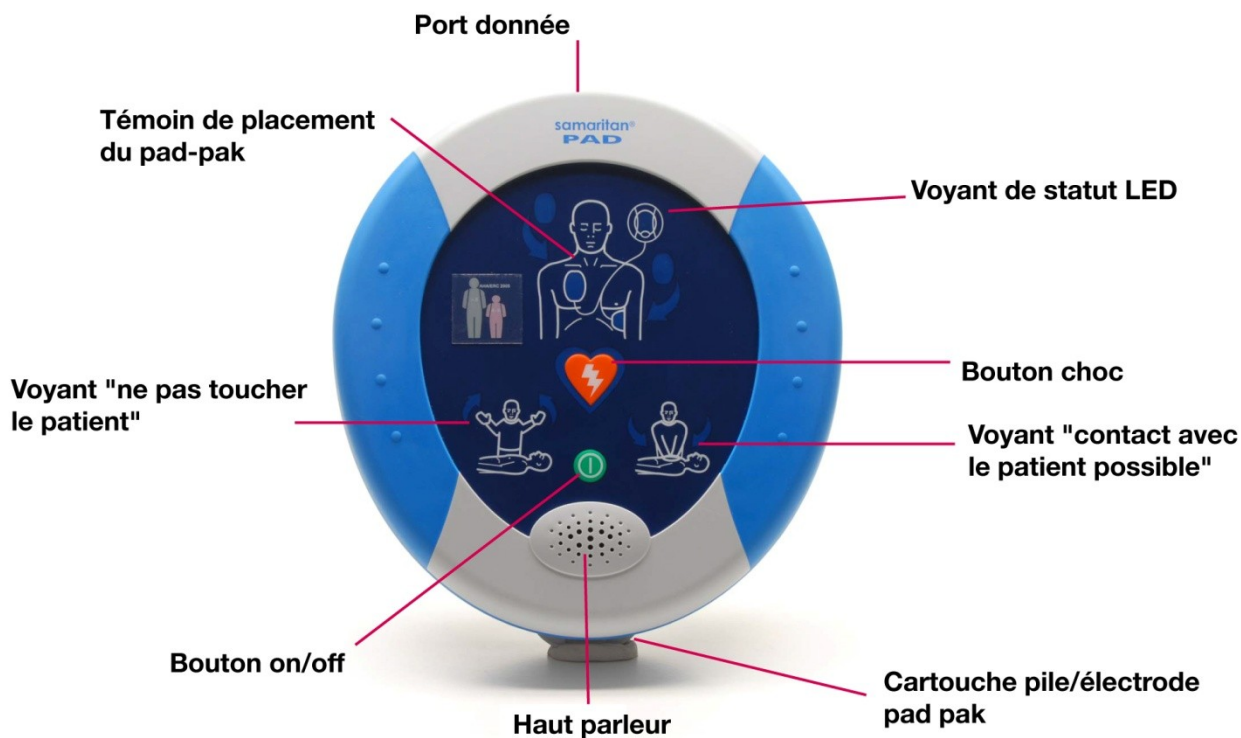

Garantie constructeur: 7 ans (échange standart en cas de dysfonctionnement lié au défibrillateur dans des conditions normales d'utilisation)

Poids: 1,100 kg

Livré avec :

- La sacoche de transport étanche et anti choc
- 2 piles au Lithium et 2 paires d'électrodes adultes (durée de vie 3,5 ans)
- Kit de premier secours (*couverture de survie, 5 compresses, gants stériles, écran facial bouche à bouche, rasoir, ciseaux*)
- 2 signalétiques murales PVC 2mm

Prix: 1459 € HT / 1745 € TTC

Tarifs

Article	Tarif HT	Tarif TTC
Samaritan PAD 300	1459 €	1745 €
PAD Pak Adulte (électrodes)	166,39 €	199 €
PAD Pak Enfant (électrodes)	200,67 €	240 €

Egalement disponibles:

- > défibrillateur de formation
- > mannequin de formation
 - > armoire murale
- > armoire murale avec alarme sonore et voyant lumineux (nous consulter pour les tarifs)

S.O.S. COLLECTION - Mr Nicolas CABARET (R.C.S. BEZIERS 498 410 703)
 Chez BOXCENTER - Z.A.E. Via Europa - Avenue de Stockholm - 34350 VENDRES

Tél/Fax: 04.67.90.92.67 // Portable: 06.81.32.16.18

Site: www.sos-collection.com // Mail: sos.collection@gmail.com